

# LIMPIEZA EN FORMA CORRECTA DE BÁSCULAS DE ASISTENCIA A LA SALUD DE RICE LAKE

Saber cómo limpiar su báscula de asistencia a la salud de Rice Lake, es vital para su duración. Una limpieza y cuidados adecuados ayudan a una operación precisa y efectiva.

**Siga estos consejos para asegurar la limpieza correcta de su báscula de asistencia a la salud de Rice Lake.**



## PASO 1

Apague el equipo.  
Desconecte la báscula del suministro eléctrico.



## PASO 2

Limpié todas las superficies externas con un paño húmedo.



## PASO 3

Seque con un paño limpio y seco.



## PASO 4

Reconecte la báscula al suministro eléctrico y reinicie su uso.

### NOTA

El uso de productos con alcohol propicia la falla de pantallas y teclados.

Pueden emplearse detergentes suaves o productos anti bacterias.

No sumerja la báscula en soluciones de limpieza u otras soluciones

Puede emplearse un producto con registro EPA, pero úselo con moderación, evitando la pantalla en lo posible.



Rice Lake sabe lo importante que son los pesajes y mediciones en la salud, adecuación física e instalaciones de salud. Conozca más visitando la página [www.ricelake.com/health](http://www.ricelake.com/health).